


3.7, 21, 23, 27,

▲ 771, 21

1R0ROOHYDUH0R0R0JDEHOOR0G0DOOD0WUWWU
VSHULRUH0ROOHYDUH0R0R0G0DOOD0EDYH0

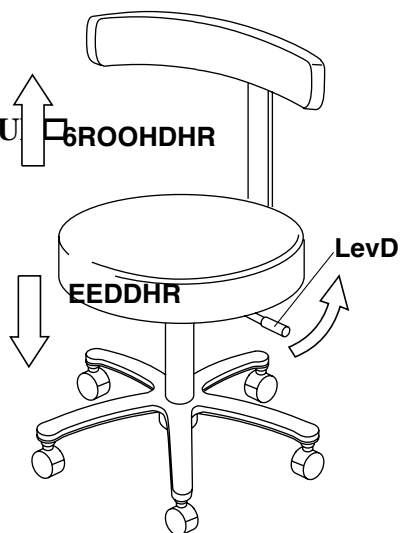

- (1) Sollevamento del sedile (Fig.3-1)
Continuare a tirare la leva senza caricare il sedile fino a quando il sedile si sta sollevando fino alla posizione desiderata e rilasciare la leva.
- (2) Abbassamento del sedile (Fig.3-1)
Continuare a tirare la leva caricando il sedile (oltre 30 kg) fino a quando il sedile si abbassa nella posizione desiderata e rilasciare la leva.
- (3) Rotazione dello schienale (Fig.3-2)
Lo schienale può essere ruotato a 360°.

Fig. 3-1 Sollevamento e abbassamento del sedile

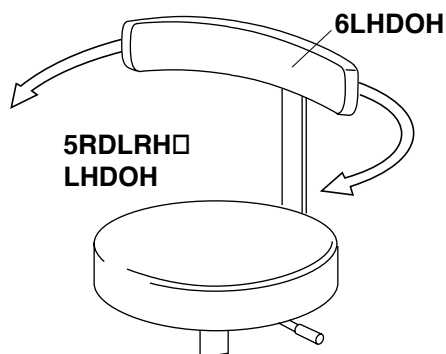


Fig. 3-2 Rotazione dello schienale

4. CURA E MANUTENZIONE

Oltre alla pulizia, non è richiesta alcuna manutenzione programmata dello sgabello

La tappezzeria può essere pulita con un detergente naturale

Le superfici verniciate, in metallo e in plastica possono essere pulite con etanolo debole



**Non bagnare la sedia per la pulizia,
Non utilizzare polvere lucidante, solventi e forti disinfettanti per la pulizia
Dopo la pulizia, pulire con un panno asciutto e mantenere la sedia asciutta**

NOTE



TAKARA BELMONT CORPORATION

2-1-1, Higashishinsaibashi, Chuo-ku, Osaka, 542-0083, Japan

TEL : +81-6-6213-5945

Book No. 1E027KB0

FAX : +81-6-6212-3680

Printed in Japan 2020-06